

INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS

NOM DE LA SOCIETE		ORGANISME DE CONTROLE
GROUPE CEPOVETT 150 ancienne route de Beaujeu, Gleizé – BP 90421, 69653 Villefranche/Saône Cedex Tel. (33) 04 74 62 47 00 Fax (33) 07 74 62 47 29		DGA MAITRISE NRBC 5 rue Lavoisier 91710 Vert le Petit

MASQUES « GRAND PUBLIC » CATEGORIE 2 - EXCLUSIVEMENT RESERVES A DES USAGES NON SANITAIRES
 SUIVANT LA NOTE D'INFORMATION INTERMINISTERIELLE DU 29 MARS 2020 MISE A JOUR LE 26 AVRIL 2020

Ce masque **C-AIR2** est destiné au milieu professionnel ou grand public et est exclusivement réservé à des usages non sanitaires. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque à visée collective est destiné à protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce masque est porté par des personnes ayant **des contacts professionnels occasionnels avec d'autres collègues** (entreprise, service, bureau...). **Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.** Ce masque pourra être indifféremment proposé aux professionnels ou grand public.

Performances : Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020

Masque catégorie 2

Efficacité de filtration des particules de 3µm : >70%

Respirabilité : essai de perméabilité à l'air >96 L.m². S⁻¹ pour une dépression de 100 Pa

Matériaux dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de la DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (rapport RP/20-2017/DGA MNRBC/2000305/NP version 1 et qui supporte 10 lavages (Rapport RP /20-3486/DGA MNRBC/2000305/NP version 1

Recommandations et limite d'utilisation :

Le temps de port du masque est limité à 4 heures

Conception établie et testée sur porteur pendant 4heures par CEPOVETT. Il faut changer le masque quand :

- Vous souhaitez boire ou manger
- Quand il devient difficile de respirer
- Si le masque s'humidifie ou est mouillé par les intempéries
- Si le masque est endommagé
- Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage

Recommandations de manipulation des masques :

- Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro alcoolique ;
- Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ;
- Lorsque l'on porte un masque :
 - Eviter de le toucher ;
 - Ne pas déplacer le masque ;
- Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydro alcoolique ;
- Pour retirer le masque : se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro alcoolique, décrocher l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque); le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ou isolez le dans un sac plastique en attendant de le laver, se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydro alcoolique



Par ailleurs, au titre de l'analyse des risques du poste de travail, l'utilisateur doit vérifier que la respirabilité effective est compatible avec les particularités du poste de travail et en particulier l'effort en application de l'article R.4323-91 du code du travail

INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS

Entretien du masque :

Avant la 1^{ère} utilisation le masque doit être lavé. Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.

Explication sur la méthode de lavage :

Lavage en machine avec un produit lessiviel adapté au tissu dont le cycle comprendra au minimum un plateau de 30 minutes à 60°C.

Séchage mécanique ou séchage conventionnel (60°C maxi).

Repassage à une température de 120/130°C (face extérieure)

Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé 10 fois.

Composition :

- Couche extérieure, 65% coton, 35% polyester
 - Couche intérieure, 100% polyester
- Matières OEKO TEX

**Conditionnement**

Lot de 10 masques

Stockage :

Masques non utilisés à stocker propres et secs, dans un emballage propre, hermétique et à l'abri de la lumière.

Contexte d'utilisation :

Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

Le port de ce masque doit être accompagné des gestes barrières essentiels

Avertissements :

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.

DECOMPTE D'UTILISATION DES MASQUES

Les masques pouvant être lavés 10 fois, chaque masque est donc utilisable 10 fois. Pour vous aider à suivre et gérer le décompte d'utilisation de vos masques, veuillez renseigner le tableau suivant en cochant les cases.

	Utilisation 1	Utilisation 2	Utilisation 3	Utilisation 4	Utilisation 5	Utilisation 6	Utilisation 7	Utilisation 8	Utilisation 9	Utilisation 10
Masque 1										
Masque 2										
Masque 3										
Masque 4										
Masque 5										
Masque 6										
Masque 7										
Masque 8										
Masque 9										
Masque 10										

Distribution des masques de façon individuelle :

Les masques sont conditionnés pour sa livraison dans le respect des règles en vigueur et selon les conditions définies dans la commande. Le conditionnement des masques par la société CEPOVETT pour la livraison à sa clientèle n'est pas adapté à leur distribution de façon individuelle. Il appartient au seul client, et à lui seul, qui commande ces masques en vue de les distribuer à l'unité dans le cadre de la lutte contre le covid-19, de respecter les règles actuellement en vigueur. En cas de distribution de ces masques à l'unité, Cepovett ne pourra pas être tenu responsable :

- D'une contamination des masques lors de leur déconditionnement ou de leur distribution,
- D'un manquement concernant l'obligation d'information des porteurs quant à l'usage et l'entretien de ces masques dont l'ensemble des instructions figurent sur ce document,
- A la traçabilité de l'ensemble des masques distribués en cas de réclamation ou de rappel à l'aide du numéro d'OF qui figure sur chaque unité de conditionnement...

Ce masque à Usages Non Sanitaires n'est ni un dispositif médical au sens du règlement UE/2017/745, ni un équipement de protection individuelle au sens du règlement UE/2016/425.